

**STAP 1**

Doe de coderingsstrip in de Pet-check glucosemeter. De letters CHK verschijnen en daarna een coderingsnummer.

**STAP 1**

Doe de teststrip in de glucosemeter. De meter stelt zich automatisch in.

**Geheugenmenu raadplegen**

Druk de M-knop in, om in het geheugenmenu te komen. Het gemiddelde van 7 dagen verschijnt in het scherm. De M-knop langer indrukken om een 14 dagen, 21 dagen en daarna 28 dagen gemiddelde te kunnen zien.

**STAP 2**

Vergelijk het coderingsnummer dat in het scherm staat met de codenummer dat op de teststrip-verpakking staat. Indien beide nummers met elkaar overeenkomen, kunt u starten met de test.

**STAP 2**

Wacht totdat in het scherm een druppelsymbool verschijnt. Bloeddruppel in contact laten komen met uiteinde van de teststrip, totdat het controlevenster volledig is gevuld met bloed. Daarna het contact tussen de bloeddruppel en de teststrip verbreken.

**Meetresultaten oproepen**

Nadat de 28 dagen gemiddelde wordt getoond, moet u de M-knop nogmaals indrukken. U ziet de laatste meting inclusief datum en tijd. De M-knop ingedrukt houden om de laatste 450 meetresultaten weer te geven.

**STAP 3**

Verwijder de coderingsstrip. De glucosemeter gaat daarna automatisch uit en verlaat de coderingsmodus.

**STAP 3**

De glucosemeter telt af en toont hierna de glucosewaarde (mmol/L).

**Geheugenmenu verlaten**

Houd de M-knop voor 3 seconden ingedrukt.