

HANDLEIDING PET-CHECK

Teststrip-opening

Teststrip hier indrukken, apparaat gaat vanzelf aan

M-instelknop

Aan- en uitzetten apparaat. Toegang tot menu en geheugen

S-instelknop

Instellen van datum, tijd en meeteenheid.



Druppel symbol

Apparaat is klaar om te meten zodra druppel knippert

Teststrip symbol

Verschijnt bij aan doen van het apparaat

Batterij symbol

Verschijnt wanneer de batterij bijna leeg is en vervangen dient te worden

Code


Toon het codenummer van de huidige teststrip, de code komt overeen met de bloedglucose meting van hond of kat

Temperatuursymbol

Verschijnt wanneer de meting niet in de aanbevolen omgevingstemperatuur wordt uitgevoerd

Testuitslag

Uitslag van de bloedglucose-meting. Bij de meting in mmol/L wordt een decimaalpunt getoond.

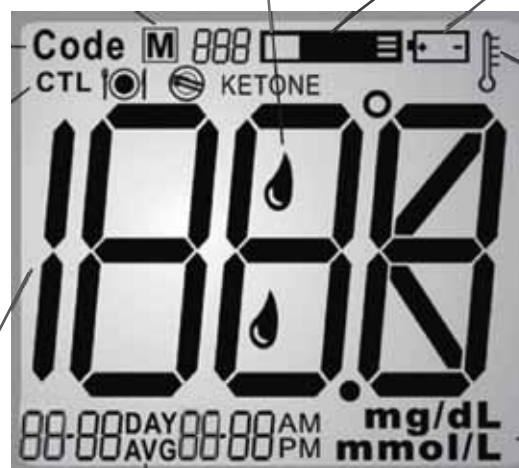

Eenheidsweergave

Geeft aan of gemeten wordt in mg/dL of mmol/L

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
Dag gemiddelde

Geeft gemiddelde bloedglucose van de dag weer

Bloeddruppel hier inbrengen

Contactstreepjes

Teststrip voorzichtig met contactstreepjes-zijde naar boven in de teststrip-opening van het apparaat invoeren.



Belangrijke informatie


- Bewaar de teststrips op een droge en koele plaats (4-32gr C). Directe blootstelling aan zonlicht en warmte voorkomen. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
- Bewaar de teststrips in de originele verpakking
- Sluit de verpakking goed
- Teststrips alleen met schone en droge handen aanraken.
- Let op houdbaarheidsdatum. Alle teststrips binnen drie maanden na opening gebruiken.
- Meetgegevens zijn niet meer betrouwbaar na vervallen van houdbaarheidsdatum
- Teststrips niet knikken of buigen.


Waarschuwing: bewaar de teststrips buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen zich in de teststrips of verpakking verslikken.

Batterij vervangen

Het apparaat wordt met een 3.0 V batterij geleverd. Deze batterij gaat minimaal 1000 metingen mee. Vervang de batterij, zodra het apparaat een lage batterijstand aangeeft of wanneer het apparaat niet meer aangaat. Het apparaat waarschuwt op 2 manieren voor een lege batterij:



1. Wanneer het  symbool verschijnt kunnen er met deze batterij nog 50 correcte metingen worden uitgevoerd, maar de batterij dient z.s.m. vervangen te worden.

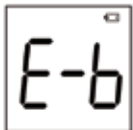


2. Wanneer het  E-b symbool verschijnt kunnen er geen correcte metingen meer worden uitgevoerd met deze batterij. De batterij moet eerst vervangen worden.

Tijdens het vervangen van de batterij moet het apparaat uit staan.

1. Aan het einde van de deksel duwen om het batterijvakje te openen.

2. Vervang de oude batterij door een nieuwe 3.0 V Lithium batterij. De plus-zijde ("+") moet naar boven.

3. Batterijvakje weer sluiten met de deksel en de meting hervatten.

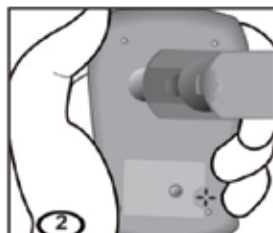

Het vervangen van de batterij heeft geen invloed op de opgeslagen meetresultaten